

“ 병원 감염방지를 위한 의료기구 소독과 멸균의 첫 걸음은 적절한 세척(세정)과정입니다 ”

의료기구 및 내시경의 4중 복합 효소 세정제

저비용 · 고효율의 탁월한 세정능력

뉴젠자임 제품특징 및 장점

Newgennzyme

- 안전하고 확실한 병원 의료기구용 전문세정제
 - 고성능의 중성세제로 기구 손상 및 부식 방지
 - 높은 세척력으로 초음파세척기, 내시경, 의료기구 세정에 적합
- 빠르고 완벽한 세정능력을 지닌 4중 복합효소 세정제
 - Protease 2종, Amylase, Lipase
- 저비용 고효율의 탁월한 세정효과
 - 1:200의 높은 희석비율에도 우수한 세정효과 (물 1L : 뉴젠자임 5cc)
 - 혈액, 단백질, 지방, 탄수화물 등 유기 오염물에 대한 뛰어난 분해력
 - 저비용 고효율의 탁월한 세정효과 발휘
- 저자극 친환경 세정제
 - 효소농축원액을 사용한 저자극 친환경 중성세제
- 온수를 사용할 필요가 없어 실온에서도 최적의 효과

- 뉴젠자임은 병원내 각종 의료기구의 세정을 위한 4중 복합 효소 세정제 입니다.

- 뉴젠자임은 인체의 혈액, 분비물 등에서 의료기구에 부착된 단백질, 지방, 탄수화물의 유기오염물을 빠르게 분해 세척하는 세정제입니다.

- 뉴젠자임은 4중 복합효소(Protease 2종, Amylase, Lipase)의 결합으로 빠르고, 완벽한 세정 효과를 발휘하는 의료기구용 전문 효소 세정제입니다.

뉴젠자임

Newgennzyme

NewGenn®

사용방법


1. 뉴젠자임과 물을 1:200으로 희석합니다.
2. 희석용액에 의료기구, 내시경 등 세척물을 2~3분간 담가둡니다.
3. 내시경 등 의료기구를 세척한 후 깨끗한 물로 헹구어 냅니다.
4. 세척이 완료된 의료기구는 소독 및 멸균 처리합니다.

제품정보

- 구성성분 : 4종 복합 효소(Protease 2종, Amylase, Lipase)
안정화제 등 함유
- 성 상 : 효소농축원액
- 용 도 : 의료기구, 내시경장비, 치과기구 등에 존재하는 유기 오염물질의 세척 및 제거
(자바라관, 실리콘 튜브, 비닐 튜브, 실리콘 캡, 실리콘 마개, 매스손잡이, 내시경류)
초음파 세척기에서 사용가능
- 포장단위 : 3.78L / 1L
- 보 관 : 건조한 냉온소에 보관(5~35°C)
- 유효기간 : 제조일로부터 24개월



제조원 : 대성 C&S 주식회사

판매원 :  NewGenn Science® 대전광역시 서구 가정동 39-39 T. 042)936-7918 www.newgenn.co.kr