



Double Filtration Filter 3-Way 여과기 세트

(의약품주입여과기 세트)



● *Double Filtration 3-Way* 여과기 세트
의료현장에서 범용으로 사용하는 IV세트에 미세한 공극을 가지는 주입표면적을 극대화한 2개의 특별한 Filter (2중 필터링)가 내장된 3-Way Stopcock이 부착된 형태.

Pore Size : 5 μ m
(5미크론 입자까지 필터링 가능)

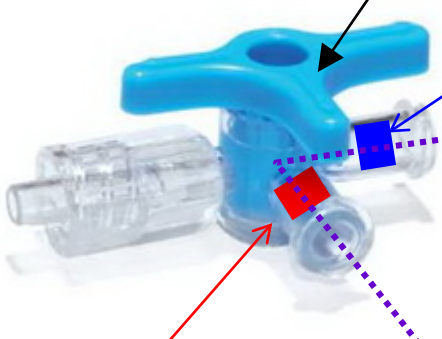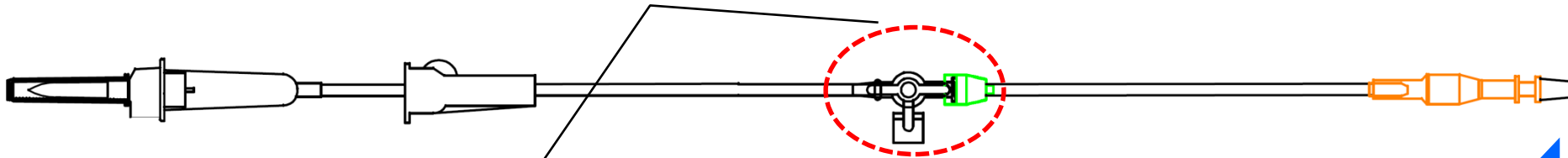

Filter B (2회 필터링)
환자의 정맥 방향

Filter A (1회 필터링) ● 주입구 (Syringe)

Double Filtration Filter 3-Way 여과기 세트

- Pore Size : 5 μ m
- 앰플주사제 주입시 유리파편 필터링
- 유리파편에 대한 완벽한 2중 필터링
- IV 라인에서 발생하는 이물질 필터링
- 우수한 필터 성능과 필터의 내약품성 보장
- Injection 저항감 최소화
- 필터니들 없이, 앰플 및 바이알주사제 사용
- 세트 교체 전까지는 제한 없이 앰플 및 바이알 주사제의 유리, 고무파편 걱정 없이 사용가능
- 간편하고 쉬운 사용방법

짚은 앰플 주사로 인한
의료진의 번거로움 해소!, 환자의 부담감과 고통 해소!

기존제품과의 비교

구 분	Filter Needle	Double Filtration 3-Way 여과기 세트	IV Filter Line
주입저항감 (주입유량)	높음 (적음)	낮음 (많음)	낮음 (많음)
필터링 효율	낮음	매우높음	높음
필터링 횟수	1회	2회	1회
내약품성	하	상	중,상
가격경쟁력 (중환자 경우)	하 ₩45,000 / 3일	상 ₩9,000 / 3일	중 ₩10,000 / 3일
적용약물	일반약물	일반약물/특정약물	특정약물
연결세트 유무	IV세트	단독사용	단독사용
수명(사용시간)	1회 사용후 폐기	최대 72시간 (3일) 사용	최대 72시간 (3일) 사용
환자청구금액	약 750원	약 9,000원	약 10,000원

중환자의 경우는 1일 20회 정도의 앰플주사제를 Filter Needle을 통해서 주입함, 이경우 환자부담은 4만 5천원/3일 임.



*Double Filtration
Filter*